

UPORABA OBRAZNE MASKE

- **PRED NAMESTITVIJO MASKE SI UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE.**
- Maska je namjena **enkratni uporabi** (uporabljene maske nikoli ne shranujte.)
- Ko jemljete masko iz embalaže, se ne dotikajte ničesar drugega.
- Ko nameščate masko, mora biti obarvana stran maske vedno na zunanjji strani.



1.

Obarvana stran



2.

Masko namestite na obraz od
zgornjega dela nosnega
korena preko ust in pod brado.



3.

Na nosnem korenju oblikujte
jekleno nit, da se maska
tesno prilega obrazu.



4.

Maske nikoli ne nosite pod
nosom ali brado!

- **Maske se ne dotikajte.** Tako preprečite prenos mikrobov.
- V primeru ovlažitve maske le to odstranite s prijemom za trakove ali elastiki, **nikakor se maske ne dotikajte spredaj.**
- Ob odstranjevanju maske glavo držite naravnost (ne glejte navzdol). S tem preprečite raztros mikrobov iz površine maske na vašo obleko.



- Masko zavrzite v koš.
- **PO ODSTRANITVI SI OBVEZNO UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE.**



MATIMA
medical